

Hera II / 140

Fotel kąpielowo- toaletowy

Instrukcja obsługi

Ważne informacje

Przed użyciem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję.

Instrukcja jest przeznaczona dla techników, terapeutów i innych pracowników i opisuje obsługę, serwisowanie i konserwację fotelu kąpielowo-toaletowego Hera II.

Date: 17-12-2019

Wer:8



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

SPIS TREŚCI

1	CEL I BEZPIECZEŃSTWO	4
1.1	Cel	4
1.2	Instrukcje bezpieczeństwa	5
1.3	Przed użyciem	5
1.4	Terminologia	6
1.5	Transport i rozpakowanie	6
2	OBSŁUGA I REGULACJA	7
2.1	Korzystanie z funkcji odchylenia	7
2.2	Regulacja akcesoriów Hera II	7
3	KONSERWACJA	9
3.1	Czyszczenie	9
3.2	Składowanie	9
4	KONTROLA I GWARANCJA	9
5	DANE TECHNICZNE	9
6	ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ	10
6.1	Utylizacja	10
6.2	Jakość	10
6.3	Symbole	10
7	ACCESSORIES	11

1 CEL I BEZPIECZEŃSTWO

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje korzystanie z fotela kąpielowo-toaletowego Hera II/140, który ma wielorakie zastosowanie i możliwości dostosowywania, oraz obejmuje również instrukcje dotyczące konserwacji.

1.1 Cel

Celem fotela kąpielowo-toaletowego Hera II jest ułatwienie pracy opiekuna w związku z potrzebami użytkownika w zakresie opieki osobistej i ułatwia mu higienę osobistą, jak np.

- w związku z czynnościami fizjologicznymi w łazience lub w innych odpowiednich miejscach domu.
- gdy użytkownik musi wziąć prysznic lub w przypadku innego rodzaju mycia.

Należy pamiętać: Zawsze uwzględniać warunki i potrzeby użytkownika.

Obsługa:

Z fotela Hera II/140 mogą korzystać użytkownicy o wadze maksymalnej 140 kg.

Fotel Hera II/140 jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach o normalnej temperaturze od +20 do +40°C i w wilgotności względnej w zakresie 40-90%.

Fotel Hera II/140 można stosować w szpitalach, domach opieki i w ramach opieki domowej.

Ważne! Nigdy nie używać fotela do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

1.2 Instrukcje bezpieczeństwa



Ważne – uwaga!

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z fotela.

- Maksymalne obciążenie wynosi 140 kg i nigdy nie może zostać przekroczone.
- Fotel nie może nosić żadnych śladów zużycia. NIGDY nie używać fotela, gdy istnieje podejrzenie wystąpienia wad (nieprawidłowe dźwięki, luźne wsporniki itp.). W takich przypadkach należy znaleźć przyczynę i wycofać fotel z eksploatacji oraz skontaktować się z dealerem lub Winncare Nordic.
- W szczególnych okolicznościach może dojść do nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych (np. podczas zastosowania na podłożu z tworzyw sztucznych lub w bardzo suchym powietrzu). Należy unikać tych warunków.
- Palenie w fotelu jest zakazane, gdyż siedzisko, oparcie i zagłówek zawierają materiały łatwopalne.
- Użyć hamulców kołowych, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego ruchu, np. na rampie lub pochyłej powierzchni.
- Podczas korzystania z fotela z innymi urządzeniami należy zagwarantować, że nie wystąpią sytuacje niebezpieczne. Podczas korzystania z podnośnika należy zachować ostrożność, aby pasy podwieszki nie zaplątały się wokół kół.
- Należy upewnić się, czy fotel jest poprawnie ustawiony dla użytkownika i czy użytkownik lub opiekun nie są ściśnięci podczas użytkowania.
- Opiekun/instytucje mają obowiązek zapewnić bezpieczną obsługę fotela.

1.3 Przed użyciem

Opiekun/użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli PRZED zastosowaniem fotela Hera II i otrzymał instrukcje co do właściwego użytkowania urządzenia.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy:

- 1) nie brak części i czy fotel jest odpowiedni dla użytkownika.
- 2) nie ma żadnych oznak zużycia lub innych wad.
- 3) funkcja odchylania działa prawidłowo oraz czy siedzisko i kółka są w dobrym stanie.
- 4) akcesoria są w dobrym stanie technicznym.
- 5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi fotela Hera II należy skontaktować się z Winncare Nordic lub dealerem, aby uzyskać więcej porad i wskazówek.

1.4 Terminologia

Hera II / 140



1.5 Transport i rozpakowanie

Fotel Hera II/140 najlepiej transportować w oryginalnym opakowaniu lub na palecie. Zaleca się zachować opakowanie na wypadek zwrotu fotela w przypadku naprawy lub corocznej kontroli.

Należy sprawdzić, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.

Wszelkie podejrzenia uszkodzeń lub braków należy zgłaszać sprzedawcy lub Winnicare Nordic.

2 OBSŁUGA I REGULACJA

W trakcie przemieszczania fotela Hera II po korytarzach lub przez progi (maks. wysokość 5 cm) najlepiej ciągnąć fotel, zapewniając tym samym maksymalną stabilność.

Ważne! Upewnić się, czy użytkownik trzyma ręce na podłokietnikach w trakcie przemieszczania przez drzwi i po korytarzach. Użytkownik powinien siedzieć spokojnie podczas tego rodzaju ruchu.

2.1 Korzystanie z funkcji odchylenia

Fotel Hera II można regulować od +5° (do przodu) do -30° (do tyłu).

Uaktywnić funkcję odchylenia, ciągnąc przewód lekko w górę i przechylając fotel do żądanej pozycji.

Ważne! Czynność ta wymaga mniej wysiłku, jeśli pcha się stopą w kierunku jednej z tylnych nóg podczas aktywowania uchyty.

2.2 Regulacja akcesoriów Hera II

Fotel należy dostosować do konkretnego użytkownika w chwili dostawy.

Ustawianie wysokości siedziska:

Ustawianie wysokości siedziska odbywa się bez narzędzi. Funkcji nie należy używać na co dzień..

- 1) Zwolnić śruby sprężynowe (A) po obu stronach i przekręcić je tak, aby oparły się o powierzchnię zewnętrzną.
- 2) Siedzisko można teraz podnieść aż do osiągnięcia wymaganej wysokości.
- 3) Obrócić śruby sprężynowe, aby ponownie się zablokowały.



Uwaga: Śruby sprężynowe TRZEBA zablokować przed ponownym użyciem fotela.

Podnóżki:

- 1) Zdjąć zatrzaski i wyregulować podnóżki do wymaganej wysokości.
- 2) Kliknąć zatrzaskami.
- 3) Jeśli podnóżki można odchylić, można je ustawić do wymaganej kąta i zablokować automatycznie.



Oparcie z PU:

Oparcie ustawia kąt automatycznie zgodnie z naciskiem pleców użytkownika.

Można je również ustawiać w górę lub w dół w zależności od indywidualnych potrzeb.

- 1) Poluzować śruby na wspornikach.
- 2) Wyregulować oparcie do odpowiedniej wysokości i ponownie dokręcić śruby.

Ważne! Nie dotyczy to tyłu wykonanego z materiału.



Zagłówek:

- 1) Użyć śruby ręcznej, aby wyregulować wysokość i kąt.



Podłokietnik:

Podłokietniki można podnieść, aby umożliwić przemieszczanie bokiem.



Zachować ostrożność, aby ręce/palce użytkownika nie zostały przytrzaśnięte podczas podnoszenia lub opuszczania podłokietników.

3 KONSERWACJA

3.1 Czyszczenie

Zaleca się, aby fotel Hera II regularnie czyścić i dezynfekować niewielką ilością standardowych domowych środków czyszczących. Siedzisko i akcesoria można zdemontować i umyć. Wszystkie części można przetrzeć spirytusem chirurgicznym.

Ważne! Jeżeli fotel jest używany przez kilka osób, NALEŻY go dokładnie wyczyścić.

Ważne! Nie wolno używać silnych środków chemicznych ani ściernych.

Jeśli fotel służy jako krzesło toaletowe, upewnić się, czy wiaderko jest prawidłowo umieszczone pod siedziskiem. Wiaderko i pokrywę można wyczyścić zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wiaderko i pokrywę zakupione u Winncare Nordic można wyczyścić w urządzeniach do czyszczenia basenów w temp. 85°C.

3.2 Składowanie

Fotel Hera II należy przechowywać w suchym miejscu o wilgotności względnej do 70%.

4 KONTROLA I GWARANCJA

Fotel Hera II musi być serwisowany i dokładnie kontrolowany przez wykwalifikowaną osobę co najmniej raz w roku. Prawowity właściciel produktu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli.

W przypadku gdy należy wymienić części z powodu zużycia lub uszkodzenia, Winncare Nordic zaleca, aby ze względów bezpieczeństwa używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Gwarancja

Rama jest objęta 10 letnią gwarancją, pozostałe części 2 letnią.

5 DANE TECHNICZNE

Hera II /140

Szerokość siedziska	435 mm
Odległość pomiędzy podłokietnikami	480 mm
Głębokość siedziska	420 mm
Wysokość siedziska	530-610 mm
Szerokość całkowita	600 mm
Wysokość całkowita (górną część uchwyty)	1035-1115 mm
Kąt przechylenia	+5° to -30°
Ciężar fotela	22 kg
Udźwig (SWL)	140 kg

6 ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ

Przewidywany okres eksploatacji fotela Hera II to 10 lat przy założeniu, że wszystkie zalecane kontrole serwisowe zostały przeprowadzone i przy normalnej konserwacji.

6.1 Utylizacja



WinnCare Nordic może przeprowadzić utylizację fotela Hera II. Gdy okres eksploatacji fotela minie, można go zwrócić do utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska, ponownego użycia lub recyklingu.

6.2 Jakość

WinnCare Nordic posiada certyfikat według norm jakości ISO 9001 i ISO 13485.

Certyfikaty te oznaczają, że firma i jej produkty spełniają normy międzynarodowe dotyczące zarządzania jakością i normy dotyczące identyfikowalności produktów medycznych.

Fotel Hera II/140 jest klasyfikowany jako urządzenie medyczne klasy 1.

6.3 Symbole



Produkt należy wykorzystać ponownie, o ile to możliwe.



Por. instrukcja obsługi

SWL

Dopuszczalne obciążenie robocze (użytkownik + akcesoria)

7 ACCESSORIES

Hera II:

- 041-00280 Hera II/140
041-00296 Hera II/140, tylko rama

Zagłówek

- 047-00310 Zagłówek

Oparcie:

- 047-00203 Oparcie, tkanina
047-00210 Oparcie z PU

Seat / lid:

- 047-00250 Siedzisko z PU
047-00255 Siedzisko z otwarciem higienicznym
047-00260 Pokrywa do siedziska z PU
047-00261 Pokrywy do otwarcia higienicznego
047-00550 Poduszka żelowa

Foot / leg support:

- 047-00030 Podnóżek, standardowy
047-00600 Podnóżek, regulowany
047-00610/611 Specjalny podnóżek, prawy/lewy

Side support:


- 047-00511 Oparcie boczne

Bucket:

- 047-00902 Wiadro z pokrywą
047-00903 Wiadro bez pokrywy

Other:

- 047-00350 Paski na łydki
047-00035 Przedłużka szerokości (podłokietnik)
047-00500 Przedłużka siedziska
047-00509/510 Poprzeczka, prawa/lewa

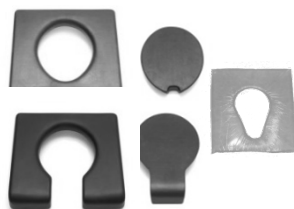

Pełna lista części zamiennych jest dostępna na życzenie. Prosimy skontaktować się z WinnCare Nordic.

Producent:
Winncare Nordic ApS.
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsoer
Denmark

Tel.: + 45 70 27 37 20
Faks.: + 45 70 27 37 19
Email: info@Winncare.dk
www.Winncare.com

93/42/EØF KLASA I
EN/ISO 10535
EN 60601-1-2
UM-910-00765PL

