

QUICKGUIDE TRITON/DUAL

Bade- og toiletstol (max brugervægt 150 kg)

OP 

NED 

TRANSPORT 

Positionerer stolen til sikker forflytning

GEM 

INDSTIL stolen i den ønskede position.
HOLD S + 1 eller **2** inde i to sek.
 Når du hører et **BIP**, er den ønskede position gemt i hukommelses-knap 1 eller 2.

TRITON/DUAL

WINCARE
N O R D I C

 **TILT FORLÆNS**
 Justerer sædevinklen op til +7°

 **TILT BAGLÆNS**
 Justerer sædevinklen ned til -30°

1 **HUKOMMELSE 1**
 Se vejledning under 'GEM'

2 **HUKOMMELSE 2**
 Se vejledning under 'GEM'



TIP!
 Brug stolens hukommelsesfunktion til hurtig og præcis positionering, fx til hårvask eller toiletbesøg.

NØDSTOP OG NØDFIR (tilbehør)

Et fabriksmonteret nødstop og nødfir er tilgængeligt som tilbehør, hvis det ønskes.

● Nødstop
 Tryk for at stoppe.
 Drej for at nulstille.

● Nødfir
 Bruges til at sænke sædet, hvis fx håndbetjeningen er defekt.



BATTERI

Op til 100 løft pr. opladning.
 Det anbefales at oplade regelmæssigt, fx om natten.



Akustisk varsel ved lavt batteri.

LED-INDIKATOR

Lys	Betydning
	Gult: Oplader
	Intet: Fuldt opladt



WINCARE
N O R D I C

