



CONECTOR DE PUERTA

PUERTA DE TRANSICIÓN. A TRAVÉS DE LA PUERTA - RÁPIDO Y FÁCIL

Los conectores de puerta se utilizan para el traslado de pacientes de una habitación a otra. El mecanismo sencillo y fiable de WinnCare se utiliza para transferir pacientes de una habitación a otra, p. dormitorio al baño, reduciendo así el número total de grúas de techo necesarias. Menos dispositivos crean un mejor ambiente de trabajo para el cuidador y un traslado más seguro para el paciente..

El conector de puerta WinnCare, como solución montada en la pared, es la opción preferida de arquitectos y contratistas de obras debido a su diseño elegante y compacto.

El conector de puerta es adecuado para la mayoría de anchos de pared. Y como se monta muy cerca de la superficie de la pared, ocupando poco espacio en la habitación, se aprovecha de forma óptima la superficie deseada para cubrir la habitación.

El conector de puerta de WinnCare tiene sólo 300 mm de ancho y no requiere cambios costosos en el sistema eléctrico del edificio, ya que se opera manualmente.



Tire del cable de acero para activar y desbloquear el conector de la puerta. Consulte la guía paso a paso en la página siguiente.

REFERENCIAS

Version	Item no.
Riel transversal 135 mm - Conector 135 mm - Riel transversal 135 mm	016-01300
- Riel fijo 135 mm - Riel transversal 135 mm	016-01304
- Riel fijo 75 mm - Riel transversal 135 mm	016-01302

LO DESTACADO DEL PRODUCTO

- Sólo 300 mm de ancho
- Flexible para sistemas fijos y transversales
- Operación manual: no se requieren costosas instalaciones eléctricas
- El transversal está bloqueada y desbloqueada. Simplemente tirando del cordón.
- Varios modelos para adaptarse a configuraciones individuales
- Funciones mecánicas a prueba de fallos



GUÍA PASO POR PASO: CONECTOR DE PUERTA



1. Tire del cable de acero para activar el conector de la puerta.



2. Deslice el travesaño hacia el conector de la puerta.




3. Cuando el travesaño esté alineado con el conector de la puerta, se bloqueará automáticamente en su posición con un sonido de clic, listo para la transferencia de habitación a habitación.




4. Una vez que la grúa de techo se haya trasladado a la otra habitación, tire de la cuerda para desbloquear el mecanismo y mover el travesaño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	Connector 135mm	Fixed track 75mm
Length	300 mm	220 mm
Height	145 mm	145 mm
Width	100 mm	100 mm

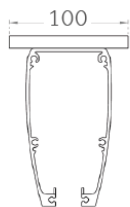

Drawings refer to connector 135 mm

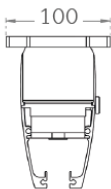

Drawings refer to fixed track 75 mm

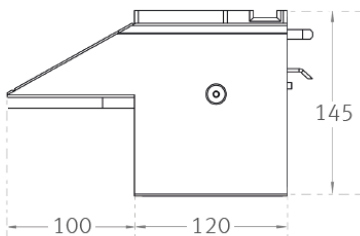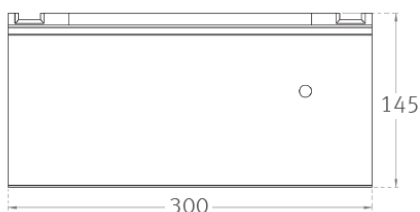

Traverse track 135 mm
Connector 135 mm
Traverse track 135 mm



Fixed 135 mm
Traverse track 135 mm



Fixed track 75 mm
Traverse track 135 mm

Consulte el manual técnico para más especificaciones.

Todas las cifras y medidas son orientativas y pueden diferir en situaciones reales. Winncare se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Las fotos de los productos pueden incluir accesorios

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE A:

winncare.es

E-mail: info@winncare.es

CE MDD93/42/EEC
Class I

Date 12.10.2023 - ver.
6

WIN CARE

